

Conozca el puente tisular modulador de fuerza Brijjit® - Descripción General

- Los Brijjits se adhieren de forma segura a la piel con un adhesivo de grado médico sensible a la presión, lo que permite una aplicación suave. No son invasivos, no duelen y, a diferencia de las suturas o grapas, no penetran la piel.
- Su cirujano, enfermera u otro miembro del personal pueden aplicar los Brijjits inmediatamente después de la operación y/o durante su primera visita postoperatoria.. De cualquier manera, se considera un uso adecuado de los Brijjits.
- Hable sobre la terapia de cicatrices de Brijjit (aplicación repetida) con su cirujano, ya que él o ella podrá responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el proceso de cicatrización.

Guía postoperatoria para pacientes:

- **Ducharse:** Puede ducharse después de las 24 horas de la aplicación de los Brijjits o cuando su cirujano le indique que puede hacerlo.
- **Aceites y lociones:** no use aceites ni lociones cerca de los Brijjits ya que esto puede provocar que el adhesivo falle y los Brijjits se caigan.
- **Prendas de compresión:** el uso de prendas o apósitos de compresión sobre los Brijjits se puede realizar según las indicaciones del cirujano.
- **Longevidad:** los Brijjits pueden durar 10 días o más, aunque la duración puede variar según el lugar o la zona del cuerpo donde se haya realizado la incisión. Para obtener resultados óptimos, manténgalos puestos hasta que se desprendan de forma natural, ya que la adhesión segura garantiza un alivio continuo de la tensión a lo largo de la incisión o la cicatriz.
 - **IMPORTANTE:** No se requiere la extracción de suturas ni grapas. Aunque los Brijjits facilitan el seguimiento remoto/telemedicina, ya que no necesitan ser retirados por un profesional médico, es **IMPORTANTE** consultar a su médico antes de intentar retirar Brijjit. Los Brijjits colocados para el cierre de heridas no deben retirarse hasta que la herida haya sanado lo suficiente para que la extracción no genere un riesgo de separación de la herida.
 - **oSoporte de terapia de cicatrices:** los Brijjits se pueden volver a aplicar de manera rutinaria para brindar soporte a largo plazo para continuar la reducción de la tensión y mejorar el aspecto final de la cicatriz. Pregúntele a tu cirujano si la terapia de cicatrices Brijjit es adecuada para ti.
- **Fisioterapia:** Los Brijjits facilitan el movimiento de las articulaciones y se pueden usar durante la mayoría de las citas de fisioterapia.
- **Hielo:** el uso de hielo sobre los Brijjits es seguro si se sigue el protocolo de aplicación de hielo prescrito por un profesional de la salud.
- **Irritación de la piel:** aunque es muy poco común,, comuníquese con su cirujano o proveedor de atención médica si experimenta irritación significativa de la piel, ampollas o sarpullido en el lugar de aplicación del los Brijjits

Guía para la terapia de cicatrices con Brijit (aplicaciones repetidas)

- BRIJ Medical recomienda dejar los Brijjits sobre la piel hasta que se caigan. Si los Brijjits se adhieren de forma segura a la piel, estos alivian la tensión.
- Una vez que los Brijjits se caen (o se retiran), se pueden aplicar nuevos para continuar brindando apoyo al proceso de cicatrización. Se ha demostrado que el uso de Brijit durante 8 semanas o más pueden aliviar la tensión® a lo largo de las incisiones quirúrgicas y reduce el área de la cicatriz hasta un 38 %*.
- Si vuelve a aplicar Brijit en su casa, utilice los códigos QR a continuación para ver los videos de capacitación para pacientes antes de aplicarlo. Tenga en cuenta que la piel DEBE DESENGRASARSE con alcohol tópico antes de aplicar los Brijjits en la piel.
- Los Brijjits deben colocarse a una distancia de entre 2 y 3 mm entre uno y otro. La ubicación de los Brijjits en la bandeja puede utilizarse como guía para saber a qué distancia deben colocarse entre sí sobre la piel.
- Aunque recomendamos dejar los Brijjits colocados hasta que se desprendan de forma natural, hay ocasiones en las que es necesario retirarlos. Puede retirarlos fácilmente moviendo el pulgar y el índice desde el centro del puente/hendidura, en paralelo a la incisión/cicatriz. Evite quitar las almohadillas individualmente de un lado a otro, ya que esto puede dificultar su extracción.
- Quitarse los Brijjits no dolerá (puede que le arranque algo de pelo, si ese es el mayor dolor que siente).

Más recursos para pacientes



Sitio web para pacientes
Aprende más sobre el alivio de la tensión y la curación.



Cómo aplicar Brijit
Escanea para ver este video y aprender cómo volver a aplicar Brijit en casa.



Canal de Vimeo de BRIJ Medical
Escanea para ver cirujanos aplicando Brijit, testimonios de pacientes y mucho más.